

Meibom-Squeezer

Medizinisches Einweginstrument zur Expression der Meibom-Drüsen


Der Meibom-Squeezer ist ein neues Instrument für die Behandlung des trockenen Auges. Bei herkömmlichen Pinzetten treten Komplikationen wie Schmerzen auf; die Handhabung ist oft umständlich.

GAUSH precision hat eine innovative Lösung entwickelt: Ein speziell konzipierter, kompakter Expressor für die Meibom-Drüsen. Die Anwendung wird vom Patienten angenehmer empfunden. Das verbesserte klinische Resultat überzeugt die Anwender.



Der Meibom-Squeezer zeichnet sich durch ein ergonomisches Design aus, welches Bindehaut und Hornhaut schützt. Das gewölbte Druckkissen mit seiner weichen Oberfläche passt sich dem Auge perfekt an. Der weiche, adhäsive gelbe Kopf drückt gleichmäßig und sanft auf das Augenlid.

Über einen integrierten Verbindungsstab, der ein einfaches Nieder- und Andrücken ermöglicht, kann der Anwender den Druck optimal kontrollieren und den gewünschten Effekt erzielen.

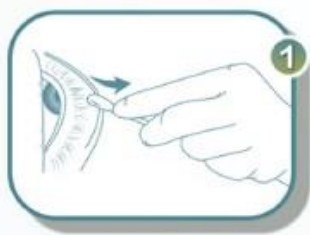

1 Heben Sie das Augenlid sanft mit Hilfe eines Wattestäbchens an.



2 Legen Sie das Druckkissen des Squeezers zwischen Augenlid und Augapfel an. Dabei muss die innere Seite des Kopfes parallel zum Augenlid sein.



3 Drücken Sie den Stab nach unten und damit den Kopf vertikal auf das Augenlid. So drücken Sie das Sekret der Meibomdrüsen heraus. Wiederholen Sie den Vorgang.